

**Mobilex Drehbarer Badesitz
Art. Nr. 302022**

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex.dk

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Der Drehbarer Badesitz ist ein medizinisches Hilfsmittel, das behinderten Personen den Ein- und Ausstieg aus der Badewanne erleichtert und es ihnen ermöglicht die Vorgänge der Körperreinigung durchzuführen. Die Badewanne kann somit benutzt werden, ohne dass hierfür ein Niederlassen auf den Wannboden notwendig ist. Die Funktion der Drehbarkeit erleichtert das Besteigen bzw. Verlassen des Sitzes auch ohne Begleitperson (abhängig vom Grad der Behinderung). Der Badewannensitz darf nur im Bad verwendet werden und hat eine max. Tragkraft von 130 kg.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Achten Sie darauf, dass die Auflage-Elemente korrekt auf die Breite der Wanne eingestellt sind, d.h. die Auflage-Elemente müssen vollständig auf dem Badewannenrand aufliegen.
- Die Auflage-Elemente sowie der Wannenrand sind im Auflagebereich Seifen- und Duschmittel-frei zu halten - Achtung Rutsch-Gefahr!
- Bitte nutzen Sie den Badewannendrehersitz nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Steigen Sie nicht auf den Badewannendrehersitz!

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Der Mobilex Badewannendrehersitz hat einen Rahmen aus Aluminium. Die Sitzfläche und Rückenlehne besteht aus weichem grauem PUR. Der Sitz lässt sich in 3 Positionen seitlich zum Rahmen versetzen, um den Drehsitz besser an die verschiedenen Wannen anzupassen und um zu verhindern, dass die Drehung durch Wasserhahn o.ä. behindert wird. Die Armlehnen und die Rückenlehne sind durch Clips am Rahmen befestigt und lassen sich leicht entfernen. Die 4 Auflage-Elemente haben Gummi-Enden um Kratzer oder Beschädigungen an der Wanne zu verhindern und eine sichere Auflage auf dem Wannenrand zu garantieren. Zwei zur Wannenbreite einstellbare Stellschrauben verhindern ein seitliches Verrutschen des Drehsitzes.

Montagehinweise


Der drehbare Badewannensitz wird zerlegt in einem Karton geliefert. Zum Zusammensetzen gehen Sie folgendermaßen vor (siehe auch Bild unten):

- Fügen Sie die Tragerohre der Rückenlehne in die Halterungen am Rahmen ein und befestigen Sie sie mit den Clips
- Stecken Sie die weiche Rückenlehne bis zum Anschlag auf die Tragerohre


- Fügen Sie beide Armlehnen in die vorgesehenen Halterungen am Rahmen einfügen und befestigen Sie sie mit den Clips

Funktionsbeschreibung

- Setzen Sie den Drehsitz auf die Wanne. Achten Sie darauf, dass alle 4 Auflage-Elemente (b) auf dem Wannenrand aufliegen und fixieren Sie die Basis mit Hilfe der 2 Klemmschrauben (d) an der Badewanneninnenseite
- Vergewissern Sie sich dass der Sitz frei rotieren kann. Eventuell lässt sich der Sitz zum Rahmen seitlich versetzen (a). 3 Positionen sind möglich.
- Drehen Sie die Sitzeinheit quer zum Wannenrand bis der Verstellhebel (c) einrastet
- Halten Sie sich mit beiden Händen an den Armlehnen fest und setzen sich auf den Sitz
Anmerkung: für einem bequemerem Einstieg lassen sich die Armlehnen leicht entfernen
- Heben Sie nun den Verstellhebel (c) und drehen Sie Ihren Körper längs zur Badewanne bis die Arretierung wieder einrastet. Die Beine müssen dazu angehoben werden.
- Für den Ausstieg verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge

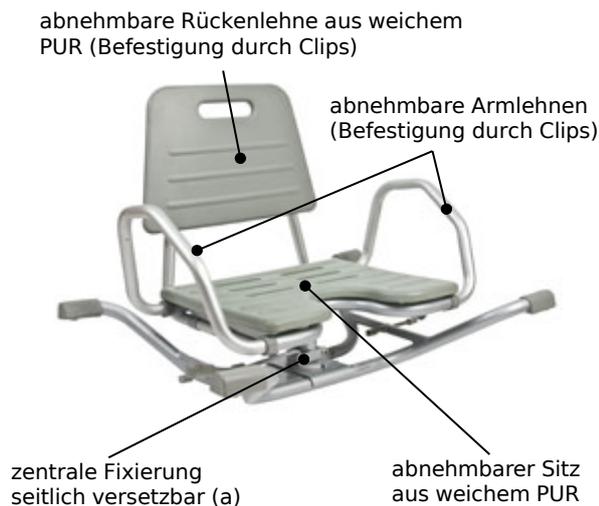

Badewannendrehsitz 302022 (Gesamtansicht)

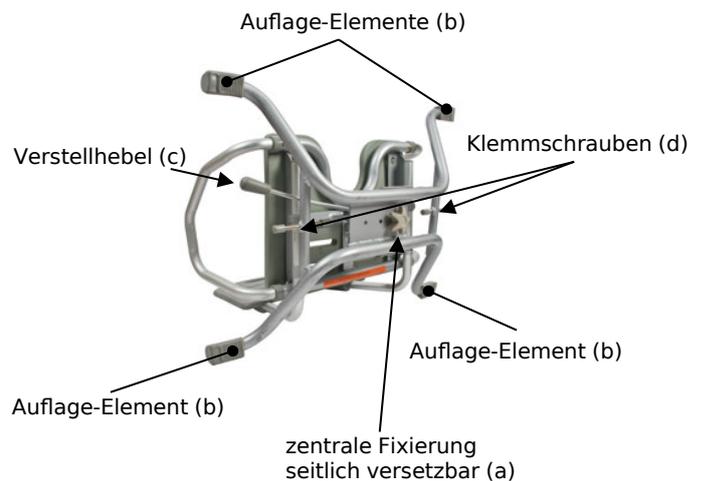

Der Drehmechanismus (Ansicht von unten)

Handhabung beim Transport

Für den Transport kann das Gerät leicht von der Wanne genommen und transportiert werden. Wenn nötig lassen sich die Rücken- und Armlehnen einfach vom Rahmen abnehmen.

Optionen / Zubehör

Für den Mobilex Badewannendrehsitz 302022 ist kein weiteres Zubehör verfügbar

4. Technische Daten:

	302022
Gesamtbreite	71 cm
Gesamttiefe	54 cm
Gesamthöhe	57 cm
Sitzbreite x Sitztiefe (weiche Auflage)	41 x 34 cm
Abstand zwischen den Armlehnen	56 cm (oben) / 51 cm (unten)
Höhe der Armlehnen	38 cm
Gesamtgewicht	4,88 kg
Tragkraft	130 kg

Geeignet für Badewannenbreiten (innen)

von 57 bis 66 cm

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich hinten am Rahmen des Drehsitzes

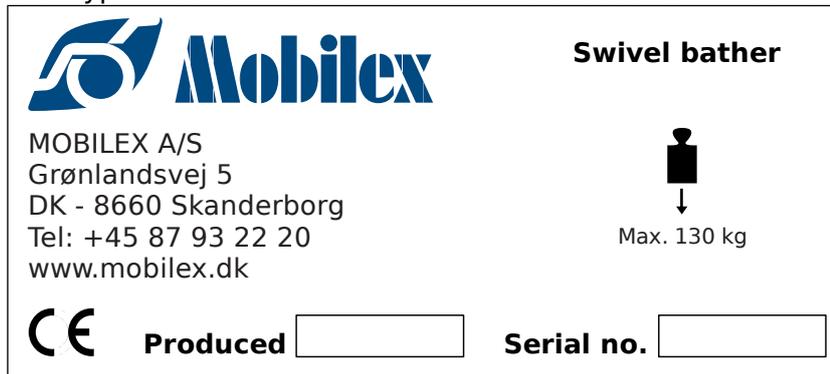


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	mögliche Ursache	was ist zu tun
Die graue weiche Sitzauflage sitzt nicht fest und verrutscht	Ein oder mehrere Halte-Noppen unten an der Sitzauflage sitzen nicht richtig oder sind nicht in den vorgesehenen Löchern eingerastet	Nehmen Sie den Badewannendreh-sitz von der Wanne und drehen Sie ihn um. Kontrollieren Sie ob die HalteNoppen richtig in den dafür vorgesehenen Löchern sitzen. Wenn nötig drücken Sie auf die Sitzauflage bis die Noppen einrasten.
Der Badewannendreh-sitz liegt nicht flach und stabil am Wannenrand auf	Die Gummienden der Auflage-Elemente sind nicht parallel und flach angeordnet	Nehmen Sie den Badewannendreh-sitz von der Wanne und drehen Sie die Gummienden der Auflage-Elemente so dass die flache Seite aller 4 Elemente waagrecht nach unten sehen
Der Badewannendreh-sitz lässt sich nicht frei drehen	Die Armlehnen stoßen an den Badewannenrand	Verstellen Sie den Drehsitz in ein anderes Loch an der Platte am Rahmen (a)

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllent-sorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt



Mobilex Drehbarer Badesitz
Art. Nr. 302022

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



Skanderborg, am 09.06.2008

.....
Unterschrift