



Montageanleitung

MA-Nr.: 01.10.127/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-mail: info@rebotec.de


Eiskrallen Art.-Nr.: 166.00 & 166.10

Zweckbestimmung

Die Eiskralle (5 Spitzen & 1 Spitze) dient der Sicherheit von Personen, die auf stockartige Gehhilfen angewiesen sind, und sich auf eis- oder schneeglatten Gehwegen bewegen.

Montage

1. Lösen Sie zunächst die beiden Schrauben an der Schelle (**Abb. 1 A**) und entfernen Sie den oberen Teil der Schelle (**Abb. 2**).
2. Falls nötig, klappen Sie nun den Rest der Schelle so um, dass der längere Abschnitt des Haltebleches zur Kralle weist, indem Sie die beiden weißen Kappen (**Abb. 2 + 4 B**) zusammendrücken.
3. Jetzt können Sie die Gehhilfe auf die offene Schelle legen (**Abb. 3**). Befestigen Sie zunächst den oberen Teil der Schelle wieder, aber noch nicht ganz festschrauben.
➔ **Achten Sie darauf, dass der Klappmechanismus auf der Gehhilfe in Gehrichtung angebracht wird!**
4. Verschieben Sie die Eiskralle jetzt auf der Gehhilfe, bis die flache Seite der Eiskralle fest auf der Saugkapsel aufliegt. Ziehen Sie jetzt die Schrauben ganz fest. Das System ist einsatzbereit.
5. Wird die Eiskralle kurzzeitig nicht benötigt, kann sie durch Drücken der weißen Kappen (**Abb. 4 B**) hochgeklappt werden (**Abb. 5**).

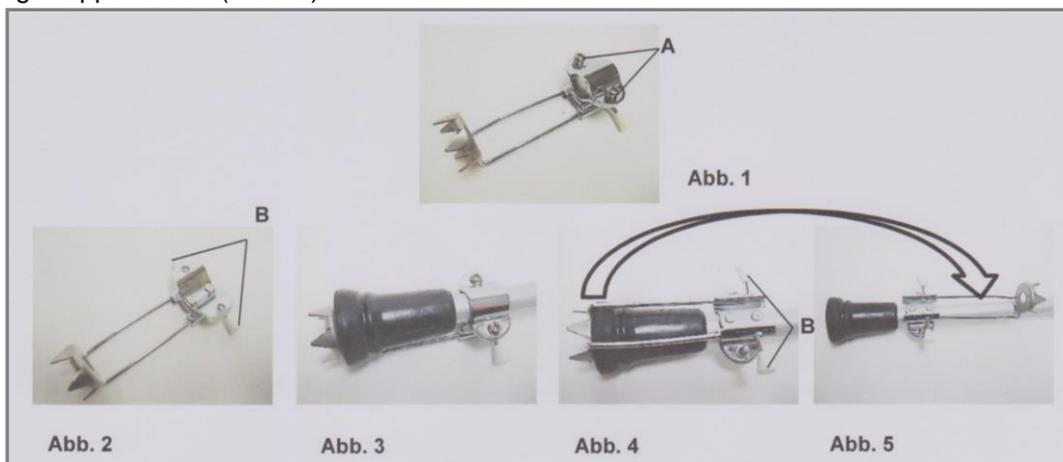

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, dieser kann Ihnen sicher weiterhelfen.



Sicherheitshinweise

- Beachten Sie unbedingt die Montageanleitung!
- Verletzungsgefahr! Aufgrund der Zweckbestimmung sind die Eiskrallen spitz und scharfkantig.
- Die Eiskrallen müssen nach der Betätigung des Klappmechanismus sicher einrasten.
- Verwenden Sie die Eiskrallen nur bei Eis oder Schnee und **nur** im Freien!
- Verwenden Sie die Eiskrallen **niemals** auf empfindlichen Fußböden!
- Wenn die Eiskrallen montiert sind, sind sie mit besonderer Vorsicht zu verwenden, da durch die Eiskrallen und unvorsichtiges Verhalten andere Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden können.
- **Demontieren Sie die Eiskrallen, sobald sie nicht mehr benötigt werden!**
- **Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Originalersatzteilen durch einen Fachhandel vorgenommen werden.**

Garantie

Die Garantie für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Lieferschein **24 Monate**. Hiervon sind Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung ausgeschlossen.